

Becutan KIDS VITS Izotonični rastvor za nos **Izotonični rastvor za nos sa morskom vodom, u spreju**

Bez konzervansa

Pravilna higijena nosa važna je za bebe, djecu i odrasle. Višak sluzi u nosnim šupljinama može povećati širenje mikroorganizama i pretjeranu suvoću sluzokože nosa.

Becutan KIDS VITS Izotonični rastvor za nos snažno hidrira nosne šupljine zahvaljujući mehaničkom djelovanju i pomaže u ispiranju i uklanjanju sluzi, što omogućava lakšu propusnost vazduha kroz nosne puteve.

Becutan KIDS VITS Izotonični rastvor za nos zadržava specifičnosti vitalnih svojstava prirodne morske vode.

Becutan KIDS VITS Izotonični rastvor za nos dolazi iz zaliva Kankale u Bretanji, poznatog po kvalitetu vode. Kankale zaliv ima izuzetno visoku plimu (12 m) i prevladavaju snažne struje koje sprečavaju zagađivanje vode. Ova jedinstvena kombinacija osigurava da se voda stalno samostalno čisti i samim tim je konstantno čista. Uzorkovanje se vrši automatski kada je kvalitet vode optimalan (nakon perioda plime). Područje uzorkovanja je klasifikovano kao klasa A i pod stalnim je zdravstvenim nadzorom (mikrobiološka, hemijska kontaminacija, fitoplankton, pH).

Sastav:

Prečišćena voda i morska voda (natrijum-hlorid 0,9%).

Indikacije:

Pravilna upotreba **Becutan KIDS VITS nazalnog izotoničnog rastvora** u svakodnevnoj higijeni nosa beba, djece i odraslih doprinosi poboljšanju stanja u nekim osnovnim indikacijama kao što su: nazofaringitis, opstruktivni rinitis i sinusitis, suv nos, promuklost zbog suve sluzokože, dodatna pomoć pri otorinolaringološkom i pedijatrijskom liječenju.

Uputstvo za upotrebu:

1. Prije upotrebe protresite bocu i uklonite zaštitnu kapu. Kada se prvi put koristi, možda će biti potrebno nekoliko puta pritisnuti aplikator da bi se raspršio proizvod.
 2. Nježno stavite vrh spreja u jednu nosnicu i pritisnite pumpu za raspršivanje proizvoda.
 3. Ostavite da se iscijedi višak rastvora kako bi se izlučila sluz, a zatim izduvajte nos.
 4. Ponovite postupak sa drugom nosnicom.
 5. Očistite vrh spreja vodom i osušite.
 6. Poklopite sprej zaštitnim poklopcem do sljedeće upotrebe.
- Nanesite u svaku nosnicu onoliko često koliko je potrebno.

Uputstva za primjenu proizvoda na bebi:

1. Položite bebu sa blago nagnutom glavom u jednu stranu da biste olakšali ulazak morske vode u nosnicu.
 2. Raspršite sprej tokom nekoliko sekundi pritiskajući glavu spreja.
 3. Stavite bebu u sjedeći položaj da bi nos iscurio. Pokupite sluz maramicom.
 4. Ponovite na drugoj nozdri.
 5. Nježno obrišite područje oko nozdruva bez stavljanja maramice duboko u bebin nos. Očistite vrh vodom i osušite.
- Nanesite na svaku nosnicu 2 do 3 puta dnevno.

Kontraindikacije i neželjena djelovanja:

- Nisu opisana neželjena djelovanja u preporučenim terapijskim dozama, ali ako se pojave neželjena djelovanja, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.
- Bilo koji ozbiljan neželjeni događaj povezan sa ovim proizvodom mora se prijaviti proizvođaču, distributeru i nacionalnom zdravstvenom organu u Vašoj zemlji.

Upozorenja:

- Iz higijenskih razloga i da bi se spriječio prenos patogenih organizama, ovaj proizvod ne bi trebalo da koristi više od jedne osobe.
- Čuvati dalje od dohvata djece.

Čuvanje i rok upotrebe:

- Ne upotrebljavajte proizvod nakon isteka roka upotrebe navedenog na kutiji i bočici.
- Čuvati na suvom i hladnom mestu.
- Bacite mjesec dana nakon otvaranja.
- Bacite bočicu i zaštitni poklopac u odgovarajuće kontejnere za reciklažu.

Opis proizvoda:

Becutan KIDS VITS Izotonični rastvor za nos 30 ml za bebe i malu djecu starosti od 0 mjeseci do 6 godina.

Preporuke:

Za bebe preporučujemo da se koriste zajedno sa **Becutan KIDS VITS Aspiratorom za nos**.

Posljednja revizija teksta: 27-01-2021

**Pharmalink, S.L.**

Av. Universitat Autònoma, 13 – Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès – BARCELONA – SPAIN
www.pharmalink.es – Customer Service: +34 666 570 401

Distributer:

ALKALOID AD Skopje

Blvd. Aleksandar Makedonski 12
1000 Skopje, Republika Severna Makedonija
www.alkaloid.com.mk



REF PL0032_BB

